


## どのように機能するのですか？

“コヘーシブペースト”は、他の“Cohesive®”製品と同様の製法に基づいて作られており、全く同じ作用でストーマ周辺の皮膚を保護します。

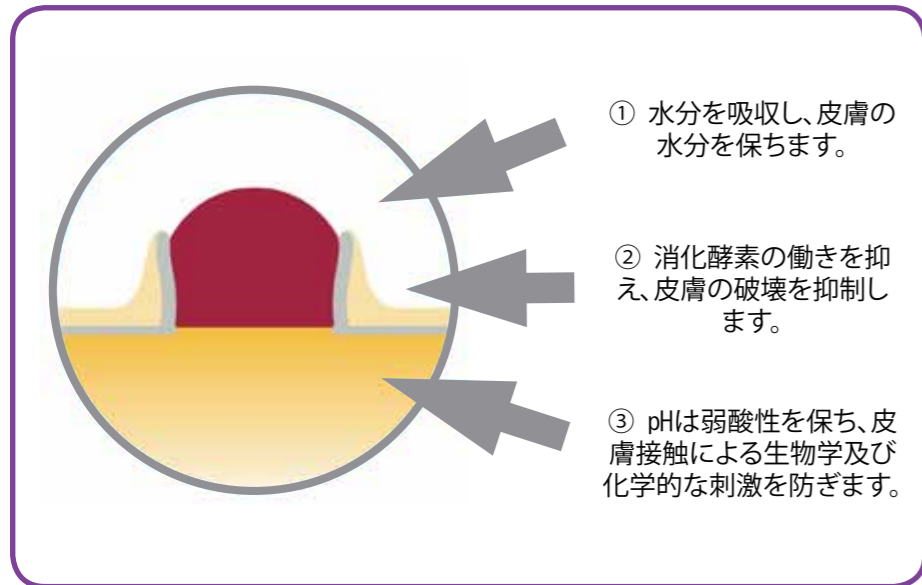

“ コヘーシブペーストを使用することで装具交換の頻度が減少しました。それにより皮膚が赤くなることもなくなりました。 ”

## Cohesive® PASTE

コヘーシブペースト  
皮膚の保護を目的に作成された練状皮膚保護剤です。難しかったストーマからの排泄物をきっちりブロックします。

包装単位： 1本/箱 製品番号：839010 容量：60g ￥2,190

eakin® 

快適さと信頼性



eakin® 

eakin® 

イーキン ジャパン株式会社  
郵便番号103-0027  
東京都中央区  
日本橋 3-4-15  
八重洲通ビルディング5F


TEL: 03-6870-3579  
www.eakin.co.jp

ECPFLY/4NB (JP)

Manufactured by:  
TG Eakin Limited  
15 Ballystockart Road  
Comber  
Northern Ireland  
BT23 5QY

Cohesive® PASTE  
コヘーシブペースト

## 快適さと信頼性

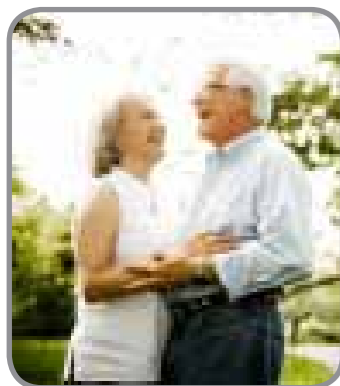

“コヘーシブペースト”は今までの物とは全く違うユニークな練状皮膚保護剤です。使用者がより高い快適さと安心感を得られるノンアルコールのペーストです。

“コヘーシブペースト”は、“Cohesive®イーキンシール”と同じ作用の商品群で、25年以上に亘りストーマ周辺の皮膚を保護してきた自慢の製品です

“ 私はコヘーシブペーストが大好きだわ！使用方法も簡単だし、すごく楽なの。 ”

## アルコール不使用

- 製品は全てアルコールを含んでいない為、非常に肌に優しいです。コヘーシブペースト”はつけ心地満点で、他のストーマペーストの様にひりひり感がありません。
- アルコールを使わないことによって、“コヘーシブペースト”は完全に乾ききりません。その為、もし誤って蓋を開けたままにしても、すぐには固まりません。



“ コヘーシブペーストは直接炎症部分につけても、痛くないです。 ”

## 肌にやさしい

コヘーシブペースト”を使用したオストメイトからは非常に肯定的な評価を頂いております。

- ストーマ周辺の皮膚の潰瘍が治った。
- “コヘーシブペースト”を使用してから皮膚の状態が健康的になった
- “コヘーシブペースト”を塗ると気持ちいい。
- 肌の状態が良くなり、赤みが無くなった。
- “コヘーシブペースト”を使ってから、かゆみが無くなった。

## 使いやすい

- コヘーシブペーストは素早く、使いやすい製品です。湿った皮膚に貼り付けるだけで、ストーマ装具を貼付するまで、ペーストの乾きを待つ必要はありません。
- コヘーシブペーストはコロストミーやイレオストミー、ウロストミーなどの様々なストーマにも対応出来ます。ストーマ周辺や、皮膚の深い皺(しわ)や癒痕(はんこん)、それにでこぼこした表面を埋めることが出来ます。そして、どのストーマ装具とも相性が良いです。
- コヘーシブペーストはゲル状で、従来のストーマペーストのように硬くなりません。それゆえにつけ心地もよく、除去も簡単にできます。
- コヘーシブペーストはパウダーやクリームを必要とせず、“Cohesive®イーキンシール”と併用できます。

### “コヘーシブペースト”の使用方法



1 周辺の皮膚を綺麗に乾かし、溶剤やパウダー、油分を取り除きます。

2 皮膚の皺や癒痕、でこぼこした表面にペーストを絞ります。

3 ストーマ周辺の皮膚にペーストを塗ります。ストーマ周囲全体にぴったりつけます。

4 いつも通りの箇所にストーマ装具を当て、30秒ほど強く押さえます。

### “コヘーシブペースト”と“Cohesive®イーキンシール スリム”の併用した使用方法



1 周辺の皮膚を綺麗に乾かし、溶剤やパウダー、油分を取り除きます。

2 “Cohesive®イーキンシール”を使用する為に、皮膚の皺や癒痕やでこぼこした面にペーストを絞ります。

3 “Cohesive®イーキンシール”をストーマ周囲の皮膚に置きます。ストーマ周囲に対してぴったり合わせます。

4 いつも通りの箇所にストーマ装具を当て、30秒ほど強く押さえます。