

利用者の声



“Cohesive®イーキンシールスリムは全く漏れを感じない新しい感覚をもたらしてくれて心も落ち着きました。それにまして素晴らしいのは皮膚の状態が非常に良いってことです。私は現在売られている他の製品すべてでアレルギーになってしまいました。私は38年間ストーマと共に生きています。今ではビジネスでたくさんのお出張をされており、イレオストーマを持っていることなんてもはや忘れてしまったよ。以前やっていたゴルフだって出来たしね。”

Cohesive®イーキンシール スリムのユーザー ドイツ

“ミスターイーキン、Cohesive®イーキンシール スリムを開発してくれてありがとう!わたしは25週も早く生まれてきてしまい、生後6日目の時に腸がつき出てしまい、2つのストーマを作らないといけなかったの。WOCさんがストーマの周りにCohesive®イーキンシール スリムを貼って、わたしの皮膚を守ってくれているんだ。これはストーマ装具が長い間しっかりと装着してくれたってことなんだって。だからわたしの皮膚は全然ヒリヒリしないし、漏れないでおなかにくっついているの。本当に、ありがとね。”

心を込めて。ジェシカより オーストラリア。”



Cohesive®イーキンシールは、北アイルランドで開発されました。30年以上もの長い間、皮膚を守り、漏れを防ぎ成功しております。

イーキンシールに関する詳細は下記ホームページにアクセスしてください:

www.eakin.co.jp

製品の情報

総合的な安全性と心の平穩のため、ストーマシールはCohesive®イーキンシールの中からお選びください。漏れへの心配を吹き飛ばし、不安のない日常を是非手にいれて下さい。

	Cohesive® イーキンシール スリム
	包装単位: 10枚/箱 製品番号839005
	Cohesive® イーキンシール Sサイズ
	包装単位: 20枚/箱 製品番号839002
	Cohesive® イーキンシール Lサイズ
	包装単位: 10枚/箱 製品番号839001

<価格>

イーキンシール	スリム	10枚入/箱	¥ 4,500 (税抜)
イーキンシール	Sサイズ	20枚入/箱	¥ 9,000 (税抜)
イーキンシール	Lサイズ	10枚入/箱	¥ 5,700 (税抜)



イーキン ジャパン株式会社
郵便番号103-0027
東京都中央区
日本橋 3-4-15
八重洲通ビルディング5F

TEL: 03-6870-3579
www.eakin.co.jp

COHCO/5NB (JP)

Manufactured by:
TG Eakin Ltd
15 Ballystockart Road,
Comber, Co. Down,
Northern Ireland,
BT23 5QY



The Flexible Solution

柔軟な発想




Cohesive®
イーキンシール

漏れ?・・・もう心配いりません

- Cohesive®イーキンシールはフランジや装具を装着する前に、ストーマ周囲に貼付します。シールは漏れを防ぎ、ストーマ周囲を完全に覆う為のシールです。
- 漏れを防ぐことによってCohesive®イーキンシールはストーマ装具をより安全にし、信頼性と心を安らかにすることが出来ました。
- Cohesive®イーキンシールが与える更なる安心感により、長時間装具を装着することが出来ました。

世界中の様々な国の多くの人々に愛されているCohesive®イーキンシール
Cohesive®イーキンシールを使用することで、自信をもって外出することが出来るようになります。

ベストな結果を得るため、Cohesive®イーキンシールを下絵のように隙間を埋めるように、しっかりと密着させて下さい。

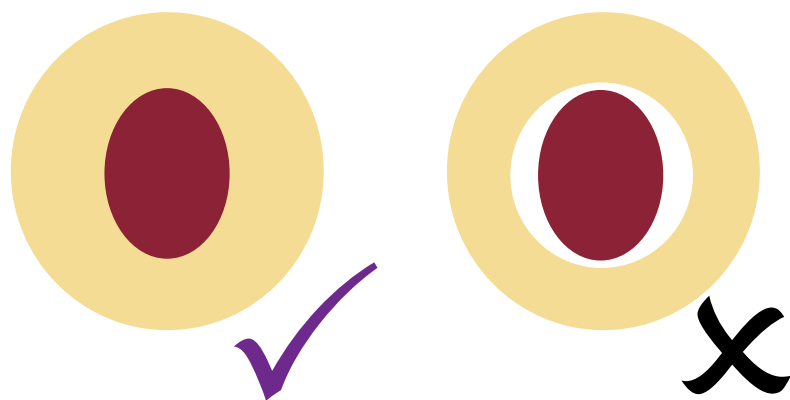

皮膚に優しい

ストーマ周囲の皮膚が赤くなったり、ヒリヒリしたり、痛みを感じた経験はありませんか?

「ある」とお答えになられた方、あなたは一人ではありません。最近の研究で、約45%のオストメイトがストーマ周囲の皮膚障害で困っています。

しかしながら、それらのほとんどのオストメイトは装具やシールが合わないことが分からなかったり、皮膚が悪くなっていたりしていることを認めなかったのです。

ストーマ周囲のヒリヒリした皮膚は主に排泄物がストーマ周囲の皮膚に接触することで引き起こされます。多くのオストメイトはそれが当たり前だと思っていました。しかしながら、これらは防ぐことが出来るのです。



なぜ、ヒリヒリした皮膚に使用すべきなのか?

もし皮膚の状態が不明なときは、お近くのWOC/ETナースがいる医療機関に連絡を入れ、相談して下さい。

* "Are Peristomal Skin Disorders Inevitable?" Herlufsen, Grete Olsen, Carlsen, Nybaek, Karlsmark & Jemec, WCET Congress, July 2006.

使い方は簡単

- Cohesive®イーキンシールは素早く且つ簡単に使えます。仮に損傷した皮膚に貼付しても痛みを伴ったりしません。形を変えられ、即座に様々なストーマの形やサイズに成形出来て直接周囲の皮膚に貼付することが出来ます。
- Cohesive®イーキンシールは、コロストミー、イレオストミー、ウロストミー問わず使用でき、全てのメーカーの製品と互換性があります。
- Cohesive®イーキンシールは成形しても粘着性を失いません。ちぎってしまって、その破片を使用しても問題ありません。

Cohesive®イーキンシールのつけ方



1 ストーマ周囲の皮膚を石鹸等でよく洗い、油分やべたつきを取り除き、水分をよく拭き取ります。



2 シールを手で温めてから両側の剥離紙を剥がして下さい。



3 紙を取り、Cohesive®イーキンシールを皆様の身体の形に合うように整えて、優しく押さえて、皮膚に密着させる形にします。イーキンシールは触っても粘着性が低下しません。



4 体の正しい位置に貼り付けが終わったら、Cohesive®イーキンシールがストーマにきちんとフィットしていることを確かめて下さい。



5 シールの外縁を平らにします。手で押さえ温めてきちんと貼り付けます。

6 ストーマ装具を適切に貼付し30秒程度押さえて下さい。

Lサイズを使用する場合は中央部分から巻き上げ、ストーマよりもやや大きい径まで広げます。シールをストーマへ貼付し、巻き上げた中央部分をストーマ周囲に取り付け、密着するように手前に戻していきます。そのあとは通常通り、装具を装着して下さい。



再使用は禁止です。



多湿は避けて下さい。



室温で保存し、高温や直射日光を避けて下さい。

Cohesive®

イーキンシール